

GYNOXIN® PROTECT

 10 globulek dopochwowych | 2 g

Instrukcja używania zawiera ważne informacje dla użytkownika: należy uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem. Produkt ten jest wyrobem medycznym, który jest dostępny bez recepty. Wyrób medyczny należy stosować zgodnie z informacjami podanymi poniżej, aby uzyskać pełne jego działanie. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. W celu uzyskania dodatkowych informacji i porad należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

SKŁAD

Glicerydy półsyntetyczne, woda osmotyczna, krzemionka koloidalna, rozpuszczalny w tłuszczach ekstrakt z nagietka lekarskiego (*Calendula officinalis* L.), ImmunoBlend – mieszanina tyndalizowanych bakterii kwasu mlekowego (*Lactobacillus casei*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus plantarum*, *Streptococcus thermophilus*), Sunfiber® – częściowo hydrolizowana guma guar, octan witaminy E, kwas mlekowy, palmitynian witaminy A.

Czym jest GYNOXIN® PROTECT

Globulki dopochwowe GYNOXIN® PROTECT to wyrób medyczny, do stosowania jako środek wspomagający w procesie leczenia objawów związanych z zapaleniem sromu i pochwy różnego pochodzenia, w tym wywołanego przez HPV (wirus brodawczaka ludzkiego). Objawy związane z zapaleniem sromu i pochwy obejmują: pieczenie, ból, świąd, suchość pochwy, dyspareunię (ból podczas stosunku płciowego) i dysurię (nieprzyjemne odczucia: pieczenie i/lub ból podczas oddawania moczu), upływy różnego rodzaju, zaczerwienienie i obrzęk sromu. Dzięki swojemu składowi działa ochronnie na błonę śluzową pochwy, tworząc niekorzystne środowisko dla namnażania się chorobotwórczych mikroorganizmów; jednocześnie łagodzi objawy, w tym świądu i przywraca prawidłowe pH pochwy.

ZASTOSOWANIE

Zapalenie sromu i pochwy to choroba polegająca na jednoczesnym zapaleniu zarówno pochwy (zapalenie pochwy), jak i zewnętrznych narządów płciowych (zapalenie sromu). Ten proces zapalny jest spowodowany różnymi przyczynami, w tym zakażeniami, podrażnieniami, zmianami hormonalnymi i urazami. Najczęstszymi przyczynami objawów dotyczących sromu i pochwy są, w kolejności ich występowania: bakteryjne zapalenie pochwy, kandydoza pochwy i rzęsistkowe zakażenie pochwy (wywołane przez *Trichomonas vaginalis*). Choroby wirusowe, takie jak zakażenie wirusem opryszczki (HSV typu 1 i 2) lub zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) są również częstą przyczyną zapalenia sromu i pochwy.

SPOSÓB I CZAS STOSOWANIA

Globulka dopochwowa jest przeznaczona do jednorazowego użycia. Zaleca się stosowanie 1 globulki dopochwowej raz na dobę przez co najmniej 5 kolejnych dni, najlepiej wieczorem przed snem. Czas stosowania zależy od zmiany nasilenia objawów; w razie potrzeby Gynoxin® PROTECT można stosować przez dłuższy okres. Czas stosowania nie powinien przekraczać 30 dni.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania dopochwowego, należy go użyć natychmiast po otwarciu plastikowego blistra. Zaleca się dokładne umycie

rąk przed użyciem. Zaleca się stosowanie tego produktu wieczorem, przed snem, w następujący sposób:

- należy dokładnie umyć okolice narządów płciowych łagodnym środkiem myjącym i osuszyć;
- pojedynczą globulkę dopochwową należy oderwać od blistra, pociągając wzdłuż przerywanej linii;
- dwie plastikowe klapki należy oddzielić od siebie i delikatnie je pociągnąć, nie otwierając całkowicie opakowania;
- globulkę dopochwową należy delikatnie wyjąć z opakowania;
- leżąc na plecach, globulkę dopochwową należy delikatnie włożyć palcami do pochwy tak głęboko, jak to jest możliwe, aby ułatwić szybkie jej rozpuszczenie.

Zaleca się pozostanie w pozycji leżącej, aby zapewnić optymalne rozprządzenie produktu i uniknąć przypadkowego wydostania się globulki z pochwy. Zwykle podczas stosowania globulek dopochwowych GYNOXIN® PROTECT może pojawić się niewielka ilość białawej i bezwonnej wydzieliny z pochwy, zazwyczaj rano po wieczornym zastosowaniu. W celu poprawy skuteczności produktu, zaleca się przeprowadzenie rano płukania pochwy za pomocą zestawu do płukania pochwy.



OSTRZEŻENIA

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego. Nie należy stosować tego wyrobu medycznego podczas miesiączki. W przypadku jednoczesnego stosowania innych produktów (w tym leków), należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania podczas ciąży i karmienia piersią: w tych przypadkach należy zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nienaruszone opakowanie bezpośrednio jest warunkiem odpowiedniej jakości i funkcjonalności produktu. Nie należy stosować tego wyrobu medycznego po upływie terminu ważności lub jeśli opakowanie jest uszkodzone lub w jakikolwiek sposób naruszone w momencie pierwszego otwarcia. Nie polykać. W razie przypadkowego połknięcia, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalem. Należy unikać kontaktu z oczami. Jeżeli dojdzie do przypadkowego kontaktu z oczami, zaleca się dokładne umycie ciepłą wodą. Nie zamrażać.

INTERAKCJE

Obecnie nie są znane żadne interakcje związane ze stosowaniem globulek dopochwowych GYNOXIN® PROTECT.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie ma szczególnych przeciwwskazań do stosowania globulek dopochwowych GYNOXIN® PROTECT. Nie należy stosować produktu w przypadku znanej nadwrażliwości lub nietolerancji na którykolwiek składnik preparatu.



LOGUS PHARMA S.r.l.
Strada delle Seriole, 43
47894 Chiesanuova,
Republika San Marino



Erbozeta Austria GmbH
Graben 12,
1010 Wiedeń,
Austria

Wytwórca posiada certyfikat
UNI CEI EN ISO 13485
dla wyrobów medycznych



Importer:
Recordati Polska sp. z o.o.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie zgłaszano żadnych działań niepożądanych podczas prawidłowego stosowania tego produktu. W przypadku wystąpienia podrażnienia błony śluzowej pochwy, należy przerwać stosowanie tego produktu i skontaktować się z lekarzem. Ważne jest, aby poinformować lekarza lub farmaceutę o wszelkich działaniach niepożądanych.



PRZECHOWYWANIE

Wyrób medyczny należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia, w temperaturze poniżej 25°C. Termin ważności dotyczy produktu prawidłowo przechowywanego w nieotwartym opakowaniu. Po użyciu nie należy wyrzucać produktu ani jego opakowania do środowiska.

OPAKOWANIE

10 globulek dopochwowych (po 2 g każda) w opakowaniu zawierającym dwa blistry.

OKRES WAŻNOŚCI: 36 miesięcy

WYRÓB MEDYCZNY  1370

Data ostatniej aktualizacji: Maj 2023



LOGUS PHARMA S.r.l.
Strada delle Seriole, 43
47894 Chiesanuova,
Republika San Marino



Erbozeta Austria GmbH
Graben 12,
1010 Wiedeń,
Austria

Wytwórca posiada certyfikat
UNI CEI EN ISO 13485
dla wyrobów medycznych



Importer:
Recordati Polska sp. z o.o.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa